

## RSU

### Rękaw uniwersalny do sterylizacji

#### Opis produktu

Przezroczyste rękawy sterylizacyjne wykonane są wyłącznie z najwyższej jakości materiałów medycznych. Do produkcji rolek o gramaturze 95g/m<sup>2</sup> użyto polyolifenu w połączeniu z 52µm folią. Wszystkie rękawy są produkowane w warunkach sterylnych. Podczas drukowania wskaźników sterylizacji klasy I. Stosuje się wyłącznie specjalny nietoksyczny, wolny od metali ciężkich tusz.

Podczas procesu sterylizacji, wskaźniki zmieniają kolor z:

STEAM z różowego na brązowy,  
EO/VH2O2 z brązowego na zielony,  
FORM z fioletowego na zielony

W celu zmniejszenia ryzyka związanego z przechowywaniem i transportem, rolki pakowane są w wytrzymałe plastikowe osłony PE i wysokiej jakości pudełka ochronne.

#### Wskazówki

Umieścić przedmioty do sterylizacji w rękawie i przyciąć go na żadaną długość. Zgodnie z rekomendacją, produkt znajdujący się w środku, powinien zajmować mniej niż ¾ rozmiaru woreczka, aby zapewnić dobre uszczelnienie i zapobiec pęknięciu. Zgrzać obydwie strony za pomocą zgrzewarki. Temperatura zgrzewu powinna wynosić około 155°C. Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. W przypadku używania wielu opakowań w sterylizatorze, należy upewnić się, że folia jest zwrócona w stronę włókniny części sąsiadującego opakowania. Jeżeli jest to możliwe, należy używać stojaka na opakowania, aby wyeliminować układanie w stosy opakowań do sterylizacji. Po zakończonym cyklu sterylizacji sprawdzić, czy opakowania są suche.

#### Zastosowanie

Przeznaczone jest do procedury sterylizacji nadtlaniem wodoru, parą, tlenkiem etylenu, formaldehydem w urządzeniach różnych producentów.



| normy  | przechowywanie i okres przydatności   | numer katalogowy i opakowanie   |
|--|---|---|
| ISO EN 11607-1&2<br>EN 868-5<br>Rozporządzenie<br>2017/745 (MDR) | W celu zmniejszenia ryzyka przechowywania i transportu, rolki są pakowane w mocne plastikowe osłony i wysokiej jakości pudełka ochronne.<br><br>Sposób użycia jest wydrukowany symbolicznie zgodnie z normą EN 980. | <b>RSU050</b> – 50 mm / 70 m<br><b>RSU100</b> – 100 mm / 70 m<br><b>RSU200</b> – 200 mm / 70 m<br><b>RSU300</b> – 300 mm / 70 m<br><b>RSU400</b> – 400 mm / 70 m<br><b>RSU600</b> – 600 mm / 70 m<br><b>RSU075</b> – 75 mm / 70 m<br><b>RSU150</b> – 150 mm / 70 m<br><b>RSU250</b> – 250 mm / 70 m<br><b>RSU350</b> – 350 mm / 70 m<br><b>RSU500</b> – 500 mm / 70 m |